

## 样本邮寄准备及注意事项

请认真阅读以下要求，提供以下测试提交清单以避免测试过程中的延迟：

### 1. 填写测试申请表(不完整的表格将延迟处理)

你是否...

- 完成家族病史？
- 获取所需的签名？
- 完整姓名和完整地址？等等.....

### 2. 使用随附的 10mL 小瓶收集并标记 7mL 样品\*

在测试申请表上填写受测者姓名，出生日期和标本采集日期的标签。

- 剥去测试申请表的标签。
- 将标签放在样品瓶上。
- 将样品瓶放入封闭的泡沫衬里载体中。
- 请确保样品处于室温下。

### 3. 准备样品以便运输

将样品瓶载体放入封闭的样品袋中。

### 4. 收集

完成测试申请表等表格的填写和信息采集。

### 5. 邮寄

将装备好的测试套装放入快递袋中。

- 样品尽量在工作日到达，以免影响接收。
- 请不要在测试盒上写下受测者的姓名。

\*\*建议您尽量选择我们推荐的快递公司。